

Министерство здравоохранения Московской области
Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Московской области
«Московский областной госпиталь для ветеранов войн»

141551, Московская область, Солнечногорский район, д. Жилино, дом № 20
тел/факс: (495) 536-06-46 E-mail: info@mogvv.ru

Отзыв о работе электрокардиографа «Кардиометр-МТ»

30 апреля 2020 года в ГБУЗ МО Московский Областной Госпиталь для Ветеранов Войн были поставлены комплексы для автоматизированной интегральной оценки функционального состояния сердечно-сосудистой системы КФС-01.001 « Кардиометр-МТ».

Комплексы были приобретены для работы в условиях стационара, перепрофилированного для лечения больных с коронавирусной инфекцией.

За 17 дней работы проведено 950 регистраций ЭКГ.

Из положительных моментов необходимо отметить простоту интерфейса, возможность быстрого обучения медперсонала навыкам работы с приборами, высокое качество регистрации ЭКГ, возможность хранения ЭКГ на удаленном сервере, возможность врачебного анализа ЭКГ в любое время с любого компьютера, что исключает необходимость присутствия врача в «красной зоне». Возможность автоматического изменения параметров ЭКГ и автоматического анализа облегчает врачу анализ и формирование врачебного заключения.

Отдельно нужно отметить опцию для оценки динамики ЭКГ, что особенно важно при ведении тяжелых пациентов с вирусными пневмониями, получающих препараты с побочными, кардиотропными эффектами для своевременной коррекции лечения.

Конечно, „при создании прибора не предполагалось, что медицинский персонал будет работать в средствах индивидуальной защиты, в двух парах резиновых перчаток, в защитных очках. Это усложняет работу с планшетом, введение данных пациентов.

Пока трудно делать вывод, как интенсивные нагрузки и необходимость дезинфекции в условиях работы инфекционного стационара повлияют на длительность бесперебойной работы приборов.

Отдельная благодарность инженерам-разработчикам и представителю группы компаний « Киль». С момента поставки систем в госпиталь по настоящее время, они отвечают на все наши вопросы в любое время.

Заведующий отделением
функциональной диагностики



Е.А. Кинцлер

Начальник госпиталя

С. Ю. Яроцкий